

DENTAL PLUS BIEN ENTRETENIR VOTRE PROTHÈSE

PFLEGE IHRES ZAHNERSATZES

pxDENTAL SA
www.pxdental.com

MATÉRIAUX CONCERNÉS · GEEIGNETE MATERIALIEN

Eldy Plus® · Polyan Plus® · Dentalos Plus® · Flexistrong Plus® · Flexiplast Plus · Polyflex Plus



PROTHÈSE AMOVIBLE

HERAUSNEHMBARER ZAHNERSATZ

FR

2× par jour, nettoyer sous l'eau tiède courante avec une brosse à main à poils synthétiques et du savon neutre ou du dentifrice.

DE

2× täglich unter fließendem lauwarmem Wasser mit einer Handbürste (Kunststoffborsten) und Kernseife oder Zahnpasta reinigen.



PROTHÈSE FIXE

FESTSITZENDER ZAHNERSATZ

FR

2× par jour, nettoyer avec une brosse à dents et du dentifrice.

DE

2× täglich mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen.



À ÉVITER · BITTE VERMEIDEN

FR

N'utilisez aucun nettoyant pour prothèses du commerce, tel que Kukident®, Corega Tabs® ou produit similaire.

Un contact prolongé avec des solutions alcoolisées à 50-90 % peut provoquer des microfissures en surface.

DE

Keine handelsüblichen Prothesenreiniger wie Kukident®, Corega Tabs® oder ähnliche Produkte verwenden.

Längerer Kontakt mit hochprozentigen Alkohollösungen (50-90 %) kann Oberflächenrisse verursachen.

INFO

Les spiritueux courants n'altèrent pas le matériau.

Normale handelsübliche Spirituosen beeinflussen das Material nicht.